

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE VERRUGAS POINTTTS®

El Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTTS® ha demostrado ser clínicamente tan eficaz como el método de congelación por nitrógeno líquido utilizado en clínicas y hospitales. Seguro, eficaz y fácil de usar, actúa congelando rápidamente la verruga plantar o vulgar. Normalmente un solo tratamiento es suficiente. Las verrugas plantares o vulgares persistentes pueden requerir 2 ó 3 aplicaciones adicionales.

### El Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTTS® consiste en:

1. Un envase de aerosol que contiene una mezcla de éter dimetilico, propano e isobutano, que no es dañina para el medio ambiente.
2. Gatillo.
3. 12 aplicadores de esponja para 12 tratamientos.
4. Este folleto de instrucciones que contiene información detallada sobre el producto y cómo funciona el Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTTS®.

### ¿Qué son las verrugas plantares y las verrugas vulgares?

Las verrugas vulgares tienen un aspecto elevado como de coliflor y usualmente salen en los dedos, el dorso de la mano, las rodillas y la cara. Son del color de la piel o ligeramente más oscuras, en ocasiones son duras y rugosas.

Las verrugas plantares suelen ser más planas, tienen los bordes duros y a veces tienen puntos negros en el centro. Salen en la planta del pie, en las yemas de los dedos de los pies o en el talón.

**SI NO ESTÁ SEGURO DE QUE TIENE UNA DE ESAS VERRUGAS, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR EL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE VERRUGAS POINTTTS®.**

### ¿Cómo funciona el Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTTS®?



Verruga vulgar



Verruga plantar

El Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTTS® elimina las verrugas de inmediato congelando rápidamente el centro de la verruga. La piel se vuelve blanca al colocar el aplicador de esponja sobre la verruga. Se siente muy frío y se aprecia un ligero dolor y sensación de ardor como resultado del congelamiento. Poco después de retirar el aplicador, se reducirá rápidamente la ausencia de color y la sensación de dolor y ardor. A veces, al cabo de unos días, se forma una pequeña ampolla debajo de la verruga. Después de la aplicación del producto la verruga se desprende normalmente en un plazo de 10 a 14 días y en su lugar se forma una nueva capa de piel.

En el caso de la verruga vulgar usualmente sólo se requiere un tratamiento. En casos más persistentes, repita el tratamiento después de dos semanas. Consulte al médico si la verruga persiste después de cuatro tratamientos.


Las verrugas plantares usualmente no se caen tan fácilmente como las verrugas vulgares y puede ser necesario aplicar el tratamiento 2 ó 3 veces más a intervalos de dos semanas. Deberá consultar al médico si la verruga plantar persiste después de cuatro tratamientos.

No trate la misma verruga plantar ni verruga vulgar con Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTTS® más de cuatro veces en total.


### MODO DE EMPLEO

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE VERRUGAS POINTTTS®


1. En el estuche encontrará todos los componentes dibujados (figura 1).

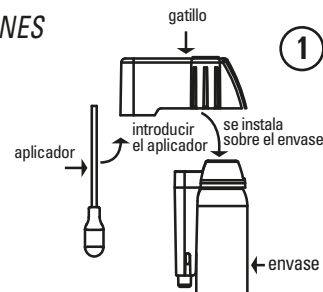


2. Sujete el aplicador de POINTTTS®. Introduzca el aplicador girando con firmeza dentro de la abertura de la parte inferior del gatillo (figura 2).

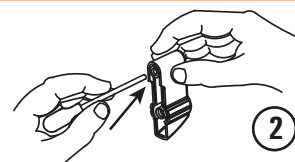



3. Si se va a tratar una verruga plantar, remoje el pie en agua tibia durante 5 minutos. Seque el pie.
4. Coloque el envase sobre una mesa u otra superficie estable. De esta manera resulta más fácil ejercer presión sobre el gatillo. No sujete el envase de aerosol cerca de la cara, ni sobre ninguna parte del cuerpo o la ropa.
5. Prepare el aplicador y el gatillo como se indica (figura 3).
  - a. Sin inclinar el envase, oprima el gatillo hasta el tope durante 3 a 5 segundos para saturar el aplicador.
  - b. Se escuchará un sonido silbante.
  - c. Deje de apretar el gatillo cuando comiencen a caer gotitas de la punta del aplicador, lo cual significará que el aplicador está saturado.
  - d) No deje que el líquido entre en contacto con su piel.

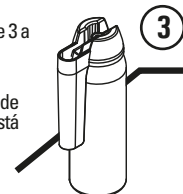

4. Retire el aplicador y el gatillo del protector y espere 15 segundos antes de aplicarlo a la verruga. De esta manera la punta del aplicador alcanzará la temperatura correcta (figura 4).

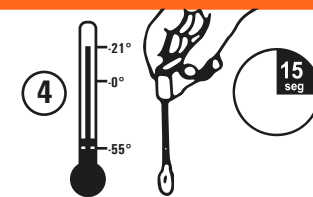

7. Tratamiento de la verruga. Exponga la verruga que va a congelar de tal forma que quede hacia arriba (figura 5).
  8. Después de esperar 15 segundos con el aplicador apuntando hacia abajo, toque suavemente el centro de la verruga que va a congelar con la punta del aplicador. Ponga en contacto el aplicador con el área tratada continuamente durante 40 segundos, no más. No toque la verruga repetidamente con el aplicador (figura 6).
- Es normal sentir un poco de dolor o ardor durante el tratamiento y por un tiempo breve después.

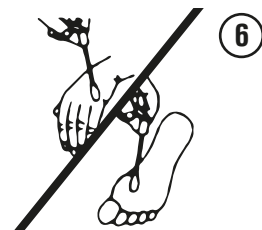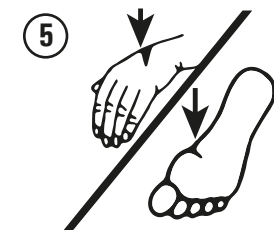

9. Elimine el aplicador con el fin de asegurar que se impedirá la posibilidad de reinfección con el virus de la verruga. No se requiere ningún método especial de eliminación.

### ¿Cuándo no debe usar Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTS®?

- En niños menores de 4 años de edad.
- Sobre lunares, manchas de nacimiento ni en otras afecciones de la piel si no está seguro (a) de que sean verrugas o mezquinos.
- En áreas donde la piel es delgada (p. ej., senos, párpados, etc.), en verrugas genitales, en las membranas mucosas (como en el interior de la boca, nariz, ano, los genitales, labios, interior de los oídos o cerca de los ojos) ni sobre la piel irritada o inflamada.
- Si es diabético o si tiene mala circulación.
- Durante el embarazo ni si está amamantando.
- El Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTS® sólo es adecuado para uso externo.

### Tratamiento de seguimiento:

- Mantenga limpia el área tratada.
- Se permite nadar y bañarse.
- No debe tocarse ni rascarse el área tratada.
- De ser necesario, proteja las ampollas con una pasta; no reviente las ampollas.
- Consulte a su médico si la sensación de dolor y ardor persiste o si tiene cualquier queja.

### Efectos secundarios:

- A veces se produce despigmentación (una pérdida temporal del color normal de la piel) cuando se usan tratamientos de congelación.
- El color normal de la piel volverá gradualmente. El uso descuidado y la falta de observación del folleto de instrucciones puede dar lugar a una congelación demasiado profunda que causaría daño a las capas superiores de la piel, resultando en cicatrices y/o lesión de los nervios.
- El congelamiento demasiado profundo de los dedos de las manos o pies puede dar lugar a la muerte del tejido local. Por lo tanto, sujete el aplicador de esponja sobre la verruga plantar o la verruga vulgar por un máximo de 40 segundos.

### Precauciones:

- Use el producto únicamente de acuerdo a las indicaciones.
- **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco.
- Si no es fácil ver o alcanzar la verruga plantar o vulgar, se recomienda pedirle a alguien que le ayude.
- No use el Sistema de Eliminación de Verrugas POINTTS® en combinación con ningún otro método de eliminación de verrugas plantares o vulgares.
- Use siempre el aplicador.
- No rocíe el producto directamente sobre la piel. El uso indebido del producto podría producir quemaduras y cicatrización del tejido sano o ceguera.
- El Sistema de eliminación de verrugas POINTTS® sólo debe usarse con los aplicadores suministrados.
- Use un aplicador diferente para cada verruga. No vuelva a usar el aplicador.
- Si hay múltiples verrugas plantares o vulgares, trate solamente una a la vez y aplique el tratamiento a las demás verrugas una por una con un intervalo de separación de dos semanas entre tratamientos.

### Advertencias:

#### **SO LAMENTE PARA USO EXTERNO. EXTREMADAMENTE FLAMABLE.**

- Mantenga el producto alejado de toda fuente de ignición.
- No exponga el producto al calor.
- Proteja el producto contra la luz solar y no lo exponga a temperaturas superiores a 50°C.
- Almacene a temperatura ambiente.
- No use el producto si está fumando o si está en la cercanía de las llamas vivas.
- Envase a presión.
- Evite el contacto con los ojos.
- Evite inhalar el gas y úselo únicamente en lugares ventilados.

Reg. No. 1207C2006 SSA

® Marca Registrada

Conserve limpio el medio ambiente.  
Deposite el envase vacío en la basura.

